

STAZIONE LAVAGGIO OCULARE

CON 2 SOLUZIONI STERILI SALINE 500 ML



Modello	PCPS202
Base contenitore	PVC
Coperchio contenitore	Polistirolo
Flacone lavaggio oculare 500 ml	Soluzione salina sodio cloruro NaCl 0,9%
Tappo doccia per flacone	Polietilene a bassa densità
Specchio	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Dimensioni	320x410x80 mm

MODALITÀ DI UTILIZZO:

- Per aprire la confezione è sufficiente tirare leggermente il coperchio lasciandolo cadere verso il basso
- Estrarre il flacone e ruotare il tappo
- In questo modo si rompe il sigillo ed il flacone è pronto all'uso
- Il tappo anatomico consente di dirigere in modo preciso il getto ottenendo un efficace lavaggio oculare senza sprechi
- A fine intervento, lo specchietto montato nella stazione può essere un utile accessorio per fare una prima valutazione dei danni

CONTIENE:

- 2 flaconi di soluzione salina sterile monouso da ml 500 con tappo oculare montato per un utilizzo rapido
- Supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura antipolvere
- Specchietto
- Viti e tasselli per l'applicazione a parete