

STAZIONE LAVAGGIO OCULARE

CON SOLUZIONE STERILE SALINA 500 ML E SOLUZIONE STERILE PH NEUTRO 250 ML



Modello	PCPS209
Base contenitore	PVC
Coperchio contenitore	Polistirolo
Flacone lavaggio oculare 500 ml	Soluzione salina sodio cloruro NaCl 0,9%
Flacone lavaggio oculare 250 ml	Lavaggio oculare a pH neutro
Tappo doccia per flacone	Polietilene a bassa densità
Specchio	Polimetilmetacrilato (PMMA)
Misure	320x410x80 mm

MODALITÀ DI UTILIZZO:

- Per aprire la confezione è sufficiente tirare leggermente il coperchio lasciandolo cadere verso il basso
- Estrarre il flacone e ruotare il tappo
- In questo modo si rompe il sigillo ed il flacone è pronto all'uso
- Il tappo anatomico consente di dirigere in modo preciso il getto ottenendo un efficace lavaggio oculare senza sprechi
- A fine intervento, lo specchietto montato nella stazione può essere un utile accessorio per fare una prima valutazione dei danni

CONTIENE:

- 1 flacone di soluzione sterile salina ml 500 per irrorare gli occhi e pulirli da eventuali sostanze
- 1 flacone di soluzione sterile PH neutro ml 250 serve per neutralizzare a livello oculare sostanze a base di acidi e/o alcali
- 1 specchietto
- 1 kit viti e tasselli per attacco a parete